


# SIC Guided Surgery – Bohrerfolge und chirurgische Planungsmasse

Bohrer	Countersink	2.0 mm	2.8 mm	3.1 mm	3.25 mm	3.75 mm	4.25 mm	optional Gewindeschneider
Implantat Ø				○	○	○	○	Ⓜ
○ 3.0 mm		✓	✓					3.0 mm
○ 3.4 / 3.7 mm	3.4 mm	✓	✓ W	N	H			3.4 mm
○ 4.0 / 4.2 mm	4.0 mm	✓	✓	✓ W	N	H		4.0 mm
○ 4.5 / 4.7 mm	4.5 mm	✓	✓		✓ W	N	H	4.5 mm
○ 5.0 / 5.2 mm	5.0 mm	✓	✓		✓	✓ W	N	5.0 mm

W Weich    N Normal    H Hart

## Bohrschablone und Instrumente

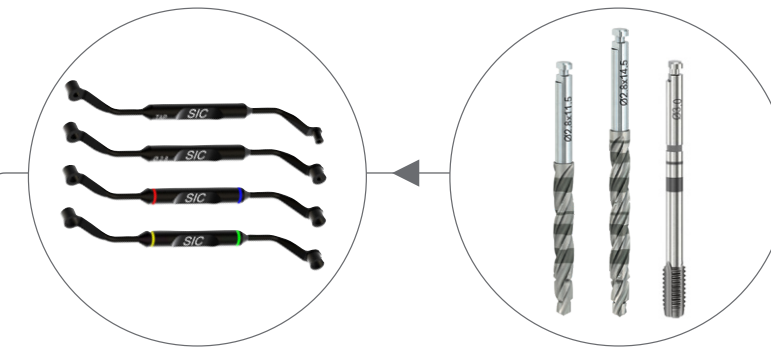

Anwendung durch Bohrerführungen



Anwendung direkt durch Schablone